

Vetramil náplast 5ks

Sterilní náplasti na rány pro psy

Specifikace produktu

- sterilní krytí, vhodné k ošetření povrchových poranění kůže s obsahem medových enzymů
- skládá se z absorpční vrstvy z přírodní viskózy, která je potažena neadhezní vrstvou polyetylénu
- vnitřní vrstva je impregnována malým množstvím kapaliny na bázi medu a glycerinu, díky čemuž je mírně vlhký
- obsahuje čistý med s vysokým obsahem enzymů (mj. glukóza oxidázy), který je vyráběn za kontrolovaných podmínek
- kontrola procesu výroby medu zajišťuje žádný reziduí pesticidů a zachovává si neustále stejnou kvalitu

Další parametry

NÁVOD K POUŽITÍ: Je-li to nutné, vyčistěte ránu obvyklým způsobem. Otevřete obal roztržením v místě zářezu. Vyjměte krytí z obalu a položte na ránu. Krytí fixujte obvyklým způsobem, například běžnou samolepicí porózní náplastí nebo obvazem. Po jednom nebo maximálně dvou dnech krytí opatrně sejměte a nahradte novým.

UPOZORNĚNÍ: Pouze pro zvířata. Přípravek není náhradou veterinární péče a léčiv doporučených veterinárním lékařem.

SLOŽENÍ: náplast s medovými enzymy

BALENÍ: 5 ks, 10 x 10 cm

